



キット内容

・抗原検査スティック×1・乾燥剤×1・使用説明書×1

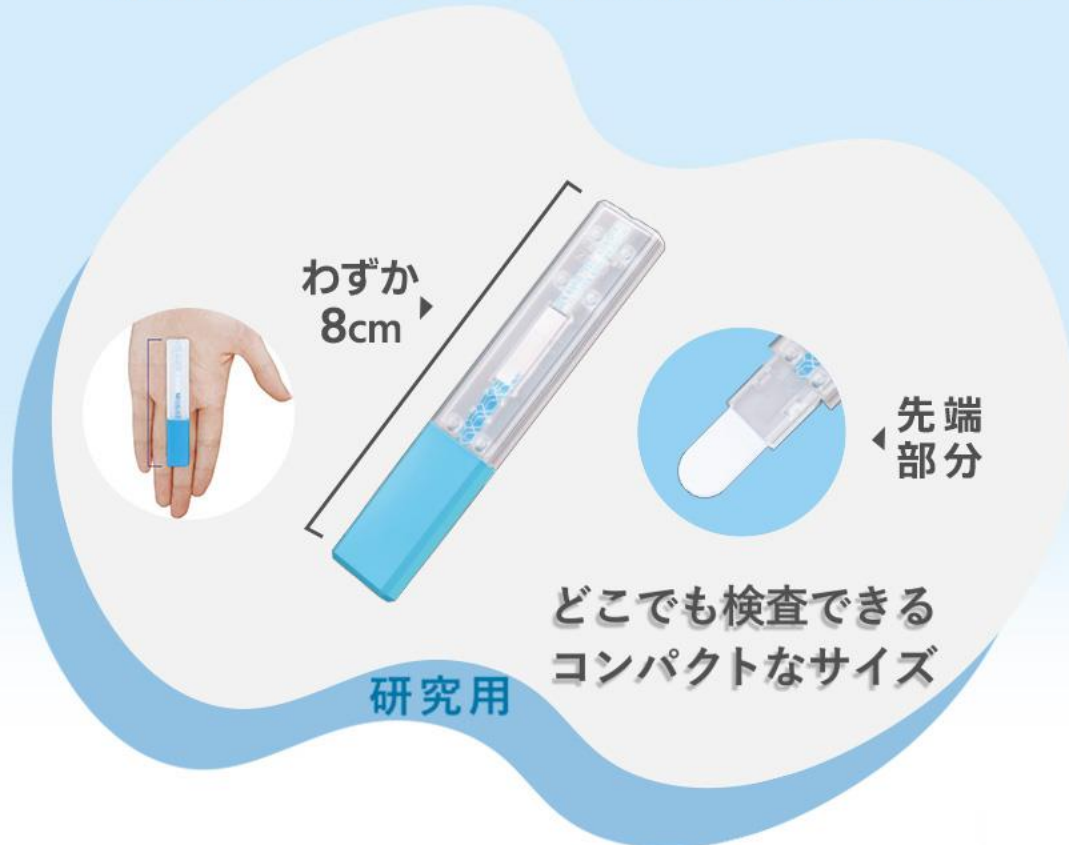

使用説明

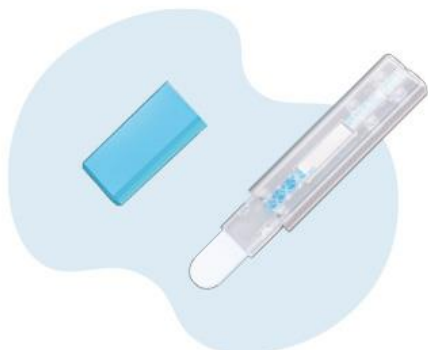

STEP 1

検査スティックの青いキャップを外します。

STEP 2

検査スティックの先端部分を舌上に置き、約2分間くわえ。



STEP 3

約10分ほど待ち、結果を判定します。

研究用

※正確な結果を得るために、飲食・歯磨き・うがい直後を避け30分以上経過してから検査してください。

検査結果

陽性




C・Tにラインが表示

陰性



Cにラインが表示され、
Tにラインが表示されない

無効

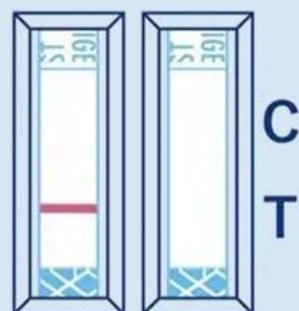

Cにラインが表示されない

研究用

